

## PÉČE

PŘED A PO KAŽDÉM POUŽITÍ  
OMYJTE PUMPU V TEPLÉ VODĚ  
A MĚKKÝ NÁSTAVEC A VÁLEC  
OŠETŘTE SPECIÁLNÍM ČISTICÍM  
PROSTŘEDKEM NA HRAČKY.

## SKLADOVÁNÍ

VYSTAVENÍ PŘÍMÉMU  
SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ MŮŽE  
ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ PUMPY.  
ZAŘÍZENÍ SKLADUJTE NA  
TMAVÉM MÍSTĚ MIMO DOSAH  
DĚTÍ A V ORIGINÁLNÍM OBALU.

# MANUAL

# DISCOVERY

## POUŽITÍ

PŘED ZAČÁTKEM JE DOPORUČENO PROVÉST 5MINUTOVOU ZKUŠEBNÍ SEANCI. TO VÁM UMOŽNÍ Pochopit, JAK ZAŘÍZENÍ  
FUNGUJE A JAK S NÍM ZACHÁZET.

PŘED POUŽITÍM SE DOPORUČUJE NANĚST NA PENIS LUBRIKANT. POUŽITÍ PUMPY S LUBRIKANTEM POMŮŽE ZABRÁNIT  
MOŽNĚMU POŠKOZENÍ PENISU, KROMĚ TOHO ZVLHČUJE POKOŽKU ORGÁNU A ZMÍRŇUJE JEJÍ VYSUŠOVÁNÍ. NEDOSTATEK  
LUBRIKANTU NEBO POUŽITÍ NEŘEDĚNÝCH LÁTEK (KRÉMU, VAZELÍNY, OLEJE, MATERIÁLŮ OBSAHUJÍCÍCH TUK) ZNIČÍ MATERIÁL  
NÁSTAVCE.

ZÁKLADNÍ FUNKCE VAKUOVÉ PUMPY:

1. CVIČENÍ PRO ZVĚTŠENÍ PENISU A EREKILNÍ SÍLY.
2. UDRŽENÍ EREKCE U MUŽŮ S EREKILNÍ DYSFUNKCÍ.
3. PREVENCE PŘEDČASNÉ EJAKULACE PŘI POUŽITÍ PUMPY PŘED SEXEM.
4. DOSAŽENÍ SEXUÁLNÍHO USPOKOJENÍ A PREVENCE SNÍŽENÍ LIBIDA PŘI DLOUHODOBÉ ABSENCI SEXUÁLNÍHO PARTNERA.

## **SCHÉMA POUŽITÍ VAKUOVÉ PUMPY KE ZVĚTŠENÍ PENISU**

1. NEŽ ZAČNETE PUMPOVAT VZDUCH, MUSÍTE NA VÁLEČ NASADIT EREKČNÍ KROUŽEK.
  2. ZAČNĚTE VYTVÁŘET VAKUUM ČERPÁNÍM VZDUCHU Z VÁLCE.
  3. KDYŽ ORGÁN DOSÁHNE EREKTLNÍHO STAVU - PŘESUNTE KROUŽEK K ZÁKLADNĚ PENISU. TO POMŮŽE UPEVNIT VÝSLEDEK DÍKY ZABLOKOVÁNÍ ODTOKU KRVE.\*
  4. UDRŽUJTE DÉLKU CVIČENÍ A POTÉ STISKNĚTE ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL.
  5. VYJMĚTE ZTOPOŘENÝ A ZVĚTŠENÝ PENIS Z VÁLCE.
- \* - SILIKONOVÝ KROUŽEK NA PODPORU EREKCE JE POTŘEBNÝ, POKUD MÁ UŽIVATEL EREKTLNÍ DYSFUNKCI.

# MANUAL DISCOVERY

## **DODATEČNÉ INFORMACE**

PUMPA MUSÍ TĚSNĚ PŘILÉHAT K OBLASTI TRÍSEL NAD ŠOURKEM. POUŽITÍ PUMPY NESMÍ ZPŮSOBOVAT NEPŘÍJEMNÉ POCITY NEBO BOLEST. POKUD POCÍTÍTE BOLEST NEBO NEPOHODLÍ, VYPUSŤTE VZDUCH Z PUMPY NEBO JI PŘESTAŇTE POUŽÍVAT.  
PRO DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ SE DOPORUČUJE POUŽÍVAT PUMPU 3 AŽ 5KRÁT TÝDNĚ. KAŽDÉ CVIČENÍ BY SE MĚLO SKLÁDAT Z NĚKOLIKA PŘÍSTUPŮ.  
PRŮMĚRNÁ DOBA ODSÁVÁNÍ MŮŽE TRVAT AŽ 5 MINUT, A PŘITOM SE STÁLE BUDETE CÍTIT POHODLNĚ.  
PRO DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ JE TŘEBA PUMPOVÁNÍ STRÍDAT.  
NEDOPORUČUJE SE PŘEKROČIT DOBU POUŽITÍ PUMPY O VÍCE NEŽ 20 MINUT.  
EXISTUJE ŘADA KONTRAINDIKACÍ. PŘED POUŽITÍM SE PORAĎTE S LÉKAŘEM.